

Rapidité d'utilisation Simplicité d'interprétation

Conseils pour le prélèvement de sang total au bout du doigt

Bras tendu le long du corps (position déclive), main au niveau de la taille

Prélèvement facilité par le lavage préalable des mains à l'eau chaude





• Identifier le test INSTI™ Multiplex
• Piquer le doigt propre du patient Désinfecter le doigt (en évitant la pince)





• Former une grosse goutte de sang suspendue



Recueillir la goutte de sang suspendue en approchant la pipette horizontalement de la goutte



• Former une nouvelle goutte de sang suspendue et la recueillir de la même façon en gardant la pipette à l'horizontale



Répéter l'opération jusqu'à ce que le sang ait atteint le trait noir de la pipette

2) RÉALISATION DU TEST



Introduire la pipette au fond du



Presser la poire de la pipette pour vider le sang dans le flacon 1

Deux points



Refermer le flacon et l'homogénéiser par



• Vider le contenu du flacon 1 dans la cupule et attendre que le liquide ait



Vider le contenu du flacon 2



• Vider le contenu du flacon 3 et lire le résultat du test immédiatement

Lecture / Interprétation des résultats 4 possibilités



Deux points






Trois points





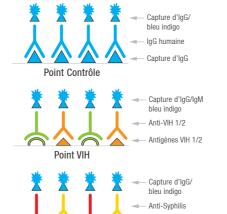


Point Syphilis



Pas de point Contrôle ni de points Test

INDÉTERMINÉS

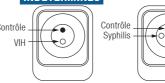





Point Contrôle avec faibles anneaux dans les zones Test

Recommandation : tout test ininterprétable doit être répété avec un nouvel échantillon sanguin en utilisant un nouveau test INSTI™/INSTI™ Multiplex et de nouveaux accessoires