


CONTENU DU KIT

- 20 cassettes test
- 2 flacons de tampon
- 20 écouvillons nasopharyngés stériles
- 20 tubes d'extraction et 20 embouts avec filtre
- 1 porte tubes
- 1 notice d'utilisation


Lire attentivement
la notice d'utilisation



1 PRÉPARATION DU TAMPON D'EXTRACTION

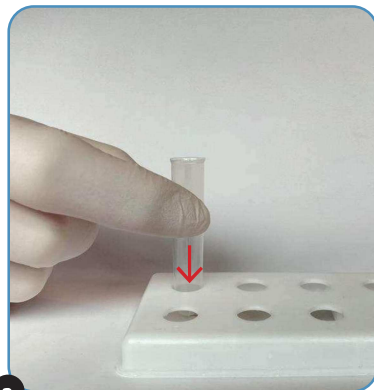


a Insérer le tube d'extraction
au fond du support

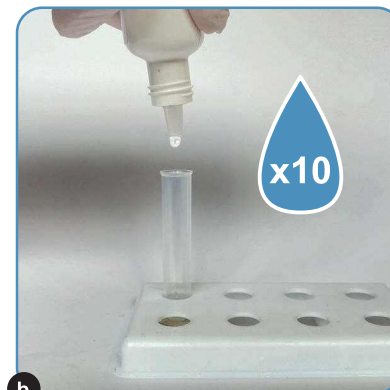


b Ajouter 10 gouttes
de tampon d'extraction

2 PRÉLÈVEMENT NASOPHARYNGÉ

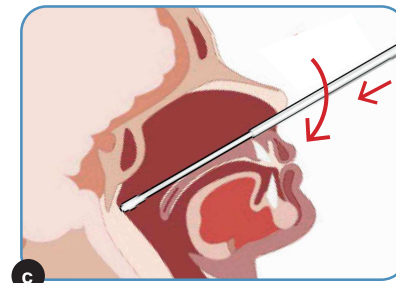


c Introduire l'écouvillon à l'**horizontal**
par rapport au visage et enfoncer
jusqu'à sentir une butée
Tourner plusieurs fois l'écouvillon
pendant **5 secondes**


3 PRÉPARATION DE L'ÉCHANTILLON

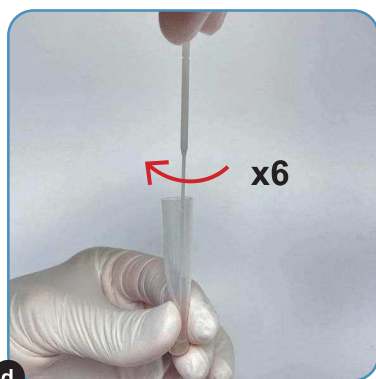


d Plonger l'écouvillon dans le tube
d'extraction et le tourner au moins
6 fois tout en pressant sa tête
contre le fond et les côtés
du tube d'extraction

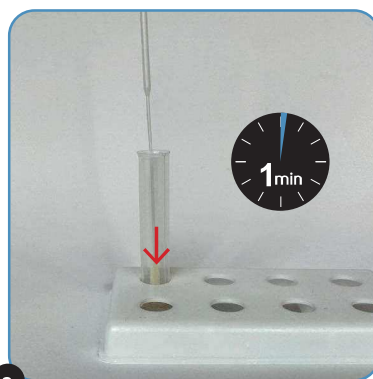

e Laisser reposer l'écouvillon
1 minute dans le tube d'extraction

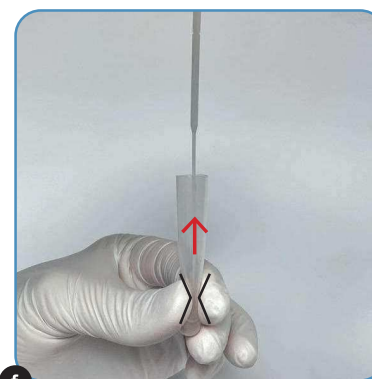

f Retirer l'écouvillon en le pressant contre
les parois du tube d'extraction et le jeter

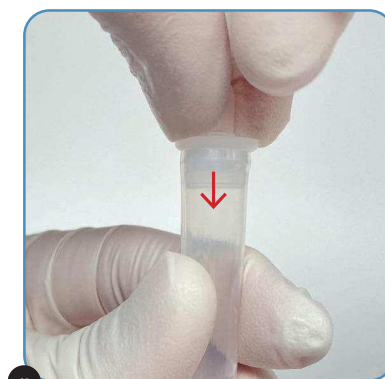

g Insérer l'embout avec filtre
sur le tube d'extraction

**L'EMBOUT DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT
INSÉRÉ DANS LE TUBE**

SUITE AU DOS

4

PROCÉDURE

5

LECTURE



**ATTENDRE 15 MINUTES
AVANT DE LIRE LE TEST**

Lire le test à la lumière naturelle ou avec un éclairage suffisant afin de distinguer les bandes de très faible intensité.



Retirer la cassette du sachet et la poser sur une surface plane



Déposer 4 gouttes d'échantillon dans le **puits échantillon (S)** de la cassette.

**LE FLACON DOIT ÊTRE
MAINTENU À LA VERTICALE**



NÉGATIF



POSITIFS



L'intensité des bandes rouges peut varier.

CONTACT



info@win-test.ch

rue du village, 8 - 1195 Bursinel - Suisse

Natel : +41 79 347 13 22

distributeur exclusif pour la suisse

AAZ 
Votre santé sous contrôle

**VIDÉO DE DÉMONSTRATION
DISPONIBLE SUR :**
www.win-test.ch