


# TETANOS QUICK STICK

Connaitre le statut vaccinal en 10 minutes !

Aide à la décision d'une prophylaxie antitétanique personnalisée


**1** Libérer la lancette

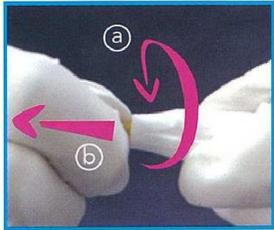


Tourner (a) puis tirer (b).

A l'aide de la lancette à usage unique, piquer sur le côté de la dernière phalange (c'est à cet endroit qu'il y a le plus de sang et que cela est moins douloureux pour le patient), en évitant le pouce et l'index. Presser le doigt pour obtenir une grosse goutte de sang.

**2** Piquer le doigt à l'aide de la lancette

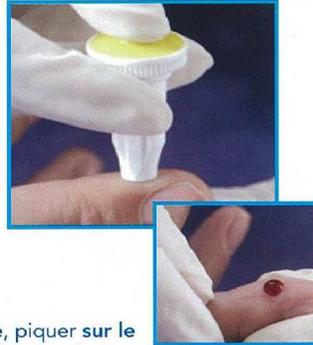


**3** Prélèvement au bout du doigt

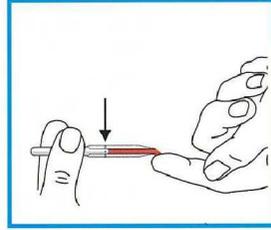

Positionner la pipette horizontalement dans la goutte de sang.


Ne pas presser la pipette, le sang monte par capillarité jusqu'au trait noir.

**4** Dépôt du sang dans le test

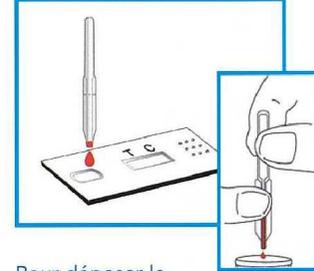


Pour déposer le sang, tenir la pipette verticalement, presser la poire, tout en positionnant 2 doigts au niveau du trait noir.

**5** Ajout du diluant

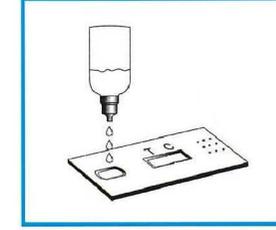

Ajouter immédiatement (moins de 10 secondes après l'échantillon de sang) 3 gouttes de diluant en tenant le flacon verticalement.

**6** 10 minutes de migration

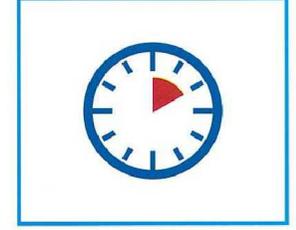

Attendre 10 minutes avant de lire le résultat.

## Identification du test et traçabilité du résultat

2 étiquettes par test sont fournies dans le conditionnement TE40B.

### Identification du test et du patient

Remplir une étiquette et la coller au dos du test.

### Tracabilité du résultat


Remplir la deuxième étiquette (nom du patient, date, résultat du test, responsable) et la coller dans le dossier du patient.




TETANOS QUICK STICK  
LOT : S-GZ-40B6041      EXP : 2010-11-30  
Patient:

Date :  
Res : POS       NEG   
Resp :

## 7 Lecture et interprétation

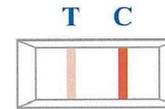

**Positif : Le patient est protégé**  
Deux bandes colorées devant les lettres T et C

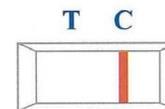

**Négatif : Le patient est insuffisamment ou pas protégé**  
Une bande colorée devant la lettre C

La bande contrôle C doit toujours être apparente pour que le test soit validé.